

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debo utilizar mi dispositivo todo el tiempo?

Sí, siempre debe utilizar **su dispositivo VirtuOx Wearable** para garantizar que el centro de monitoreo y su médico puedan acceder a la información importante sobre su corazón lo antes posible. El dispositivo VirtuOx Wearable es resistente al agua, **lo que le permite realizar** sus actividades diarias mientras lo usa. Sin embargo, se recomienda retirarlo y cargar el dispositivo RhythmStar Wearable durante 20 a 30 minutos cada día.

¿Puedo viajar con el dispositivo puesto?

Si planea estar fuera durante varios días, lleve consigo la base de carga y el adaptador USB para poder recargar el dispositivo. No olvide llevar electrodos adhesivos adicionales. Si viaja en avión, el monitor puede activar los detectores del aeropuerto, pero no sufrirá daños. Puede mantener el dispositivo encendido y en funcionamiento durante el vuelo.

¿Necesito acceso a internet inalámbrico o un plan de datos móviles?

No, el dispositivo VirtuOx Wearable cuenta con tecnología celular 4G integrada y envía la información de su corazón al centro de monitoreo a través de la red celular. No tiene ningún costo para usted por la transmisión de datos y no necesita usar ni vincular su teléfono al dispositivo, ya que los datos se envían directamente sin necesidad de un dispositivo de comunicación externo.

¿Con qué frecuencia debo cargar mi dispositivo?

El VirtuOx Wearable tiene una batería recargable integrada. Se recomienda cargar el dispositivo durante 20 a 30 minutos al día con la base de carga VirtuOx y el adaptador USB. El indicador de batería se encenderá en rojo fijo mientras se carga y cambiará a verde cuando el dispositivo esté completamente cargado.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse el dispositivo?

Si no carga su dispositivo VirtuOx Wearable durante 20 a 30 minutos al día, puede tardar hasta 3 horas en cargarse por completo.

¿Qué pasa si el dispositivo se siente caliente al tacto?

VirtuOx Wearable funciona con un consumo de energía extremadamente bajo. El dispositivo no debería aumentar su temperatura. Sin embargo, si nota que el dispositivo se siente caliente, retírelo y comuníquese con un coordinador de atención de VirtuOx.

USO PREVISTO

El sistema VirtuOx está destinado a pacientes que presentan o están en riesgo de presentar enfermedades cardíacas, así como a aquellos que manifiestan síntomas intermitentes indicativos de afecciones cardíacas y requieren monitoreo cardíaco de forma continua.

El dispositivo registra de manera continua los datos del ECG y, al detectar una anomalía mediante un algoritmo de análisis de ECG (o tras la activación manual por parte del paciente), transmite de forma automática la actividad cardíaca registrada al servidor, donde se puede visualizar y evaluar por un profesional médico.

Otros equipos pueden utilizar los datos recibidos desde el dispositivo VirtuOx para analizar arritmias, generar informes y medir señales. El sistema VirtuOx no está diseñado para emitir alarmas.

El dispositivo no proporciona terapia alguna, no administra medicamentos, ni ofrece interpretaciones diagnósticas ni soporte vital. VirtuOx solo debe utilizarse bajo prescripción médica (Parte 21 CFR 801 Subparte D).

CONTRAINDICACIONES

El sistema VirtuOx no debe usarse en los siguientes casos:

- Pacientes con arritmias potencialmente mortales y necesitan control durante la internación.
- Pacientes que el médico tratante decide hospitalizar.
- Lactantes con un peso menor a 10 kg (22 libras).

Precaución: La legislación federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo únicamente a médicos o bajo su indicación.

VirtuOx cumple con las normativas actuales de exposición a emisiones de radiofrecuencia de la FCC.



5850 Coral Ridge Drive, Suite 301 • Coral Springs, FL 33076
(888) 308-0067
VirtuOx.net

©2020 VirtuOx. Todos los derechos reservados.
REF 10003-62-00-ENG REV1.



SISTEMA DE MONITOREO
CARDÍACO REMOTO PONIBLE

Guía de inicio rápido

Simplemente conectado

¿QUÉ INCLUYE EL KIT?



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1 Encienda el dispositivo VirtuOx Wearable al presionar brevemente el botón de encendido ubicado en la parte posterior del monitor hasta que el dispositivo vibre y las luces LED del frente parpadeen una vez. Si la luz del estado de la batería parpadea en rojo, será necesario cargar el dispositivo antes de usarlo. (Consulte las imágenes de los íconos LED en el paso 5 como referencia).



Para cargar el dispositivo, conecte la base de carga al adaptador de corriente y coloque el VirtuOx Wearable sobre la base. La luz de estado de la batería cambiará de rojo fijo a verde fijo una vez que el dispositivo esté completamente cargado y listo para su uso. (Consulte las imágenes de los íconos LED en el paso 5 como referencia).


El dispositivo VirtuOx Wearable debe cargarse entre 20 y 30 minutos cada día; de lo contrario, podría demorar hasta 3 horas en cargarse por completo.



2 Preparación de la piel:

- Recorte el vello del pecho si es necesario.
- Limpie la piel con agua tibia y déjela secar por completo.
- No utilice lociones ni cremas antes de colocar los electrodos adhesivos.

- 3** Conecte un electrodo adhesivo en la parte posterior del monitor VirtuOx Wearable y otro en el conector rojo.
- 4** Retire la lámina protectora de los electrodos adhesivos y colóquelos sobre el pecho según se indica en la ilustración:

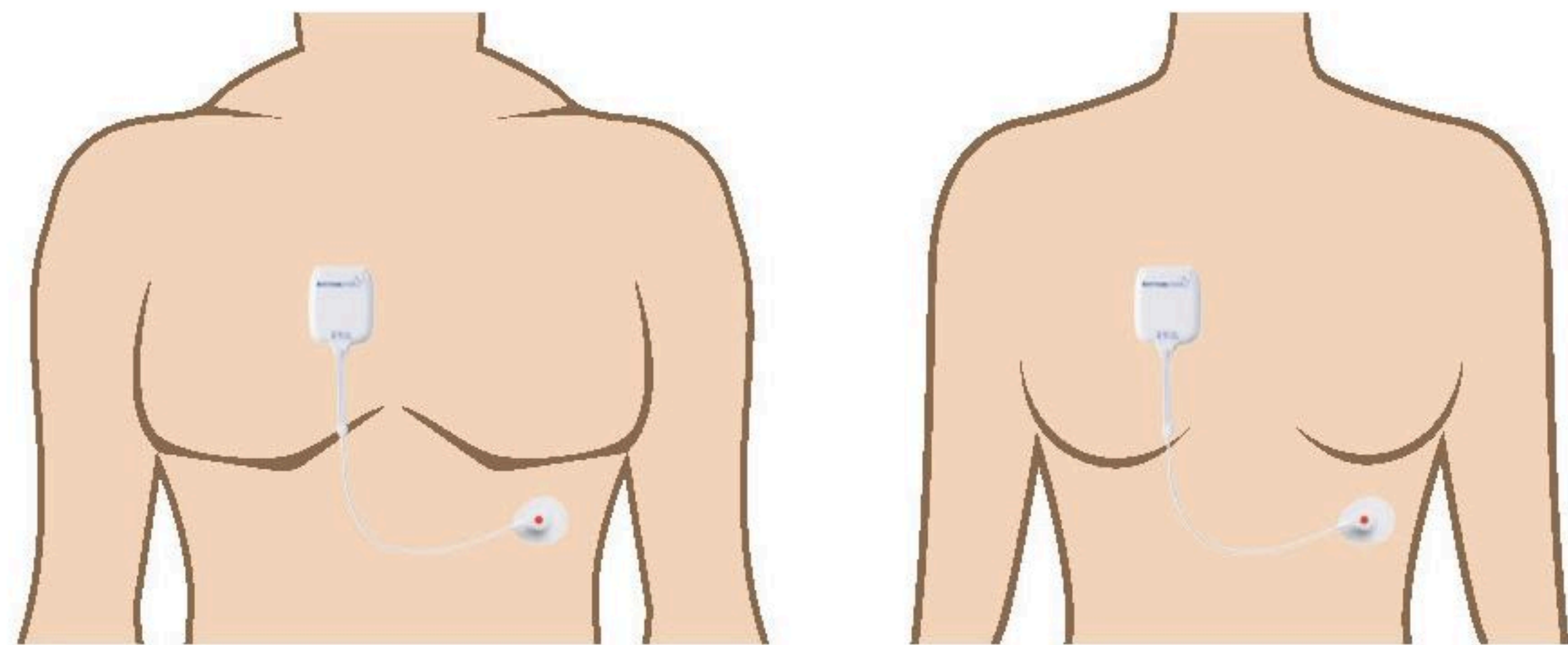

UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO EN PACIENTES MASCULINOS UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO EN PACIENTES FEMENINOS

5 Verifique que el monitor funcione de forma correcta a través de los íconos LED de colores en la parte frontal del dispositivo:




Monitoreo: la luz de estado de monitoreo parpadea en verde cada 10 segundos, lo que indica que el monitor está funcionando de forma correcta. Esta luz verde se mantendrá encendida de forma continua durante 30 segundos cuando se registre un evento activado de forma manual por el paciente. (Consulte el paso 6 como referencia).



Batería cargada: cuando el monitor está en la base de carga y esta se encuentra conectada a la fuente de alimentación, la luz de estado de la batería se encenderá en verde fijo, lo que indica que el monitor está completamente cargado.



Batería baja: cuando la batería se encuentra baja, la luz de estado de la batería comenzará a parpadear en rojo. Una vez que se coloque el monitor en la base de carga y esta se conecte a la fuente de alimentación, la luz roja permanecerá fija, lo que significa que el dispositivo está en proceso de recarga.

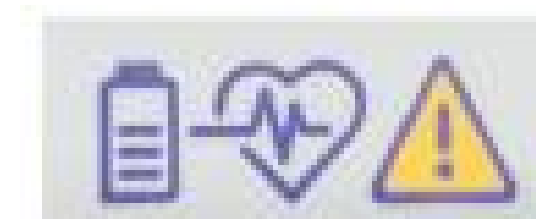

Conexión de electrodos: cuando el monitor está encendido pero no se encuentra bien conectado, la luz de estado de conexión parpadea en amarillo cada 5 segundos. Esa misma luz también parpadea de forma rápida durante el encendido del dispositivo, durante unos 30 segundos después de activarlo. Una vez que el monitor está en funcionamiento y la conexión es correcta, la luz deja de parpadear. Si en algún momento la luz amarilla vuelve a parpadear, verifique la conexión. Asegúrese de que los electrodos adhesivos estén bien ajustados tanto al monitor como al conector rojo, y que estén bien adheridos a la piel.

En caso de necesitar ayuda, puede contactar a un coordinador de atención de VirtuOx.

6 Si experimenta algún síntoma mientras lleva puesto el monitor, dé dos golpecitos firmes sobre el dispositivo. El monitor emitirá una leve vibración como señal de confirmación. La luz verde de monitoreo se encenderá durante 30 segundos para señalar que el evento quedó registrado. El sistema marcará ese momento en los datos, lo que ayudará a su médico a identificar con precisión cuándo ocurrió el síntoma al revisar el informe.



DURANTE EL MONITOREO

- Cambie los electrodos adhesivos según sea necesario. No deben reutilizarse bajo ninguna circunstancia.
- El dispositivo VirtuOx Wearable es resistente a salpicaduras, pero no debe sumergirse ni utilizarse durante la ducha o al nadar.
- En cualquier momento, si tiene dudas o inquietudes, puede comunicarse con un coordinador de atención de VirtuOx.

AL FINALIZAR EL ESTUDIO

A menos que su médico le indique devolver el monitor a su consultorio, el dispositivo y los accesorios relacionados (la base de carga, el adaptador de corriente USB y los paquetes sin abrir de electrodos adhesivos) deben devolverse a VirtuOx sin demora para evitar cargos adicionales. Coloque el monitor y los accesorios en la caja de embalaje y luego coloque la caja dentro de la bolsa de envío prepagada proporcionada para su devolución.